

ООО МТСК «Лаборатория»

Адрес: 109202, г. Москва, ш. Фрезер, д.5/1, помещение 1, оф. 47


Тел./факс: (495) 640-2583

ИНН/КПП: 7721792651 / 772101001

ОГРН: 1137746359519

Лицензия на осуществление деятельности

по техническому обслуживанию №ФС-99-04-001260 от 22.04.14 г.

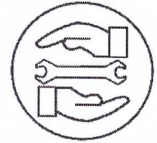

www.mtsklab.ru

Работы по техническому обслуживанию Hamilton Arabella

1. Внешний осмотр блоков аппарата на наличие механических повреждений;
2. Проверка присутствия и читаемости всех наклеек на аппарате;
3. Проверка тормозных зажимов стойки аппарата;
4. Проверка соединительных кабелей, проверка разъемов и фиксаторов, трубок на наличие видимых физических повреждений;
5. Прочистка печатных плат от загрязнений с частичной разборкой;
6. Демонтаж компонентов с закончившимся сроком эксплуатации;
7. Установка компонентов в замен демонтированных;
8. Проверка памяти ошибок аппарата;
9. Калибровка кислородной ячейки;
10. Калибровка потенциометра тревоги положения кислородного смесителя;
11. Калибровка манометра;
12. Тест цифрового дисплея;
13. Тест Bar Graph;
14. Тест LED;
15. Тест семисегментного индикатора;
16. Тест дисплея;
17. Тест дисплея 2;
18. Тест настройки яркости;
19. Тест светового индикатора тревог;
20. Тест внутреннего технического контура датчика потока;
21. Тест предохранительного клапана пациента;
22. Тест предохранительного клапана системы;
23. Тест кислородного датчика;
24. Тест смесителя;
25. Тест контрольных напряжений;
26. Выдача протокола контроля технического состояния аппарата.

Инженер-разработчик
ООО МТСК «Лаборатория»:



ООО МТСК «Лаборатория»

109202, г. Москва, ш. Фрезер,
д.5/1, помещение 1, оф. 47

Телефон: +7(495) 640-2583
Телефакс: +7(495) 640-2583