

ООО МТСК «Лаборатория»

Адрес: 109202, г. Москва, ш. Фрезер, д.5/1, помещение 1, оф. 47


Тел./факс: (495) 640-2583

ИНН/КПП: 7721792651 / 772101001

ОГРН: 1137746359519

Лицензия на осуществление деятельности

по техническому обслуживанию №ФС-99-04-001260 от 22.04.14 г.

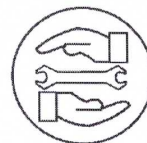

www.mtsklab.ru

Работы по техническому обслуживанию Hamilton-C2

1. Внешний осмотр блоков аппарата на наличие механических повреждений;
2. Проверка присутствия и читаемости всех наклеек на аппарате;
3. Проверка тормозных зажимов стойки аппарата;
4. Проверка соединительных кабелей, проверка разъемов и фиксаторов, трубок на наличие видимых физических повреждений;
5. Прочистка печатных плат от загрязнений с частичной разборкой;
6. Проверка или обновление программного обеспечения в соответствии с рекомендациями завода производителем;
7. Демонтаж компонентов с закончившимся сроком эксплуатации;
8. Установка компонентов взамен демонтированных;
9. Проверка памяти ошибок аппарата;
10. Тестирование системы тревог;
11. Тестирование монитора тревог 1;
12. Тестирование монитора тревог 2;
13. Тестирование пользовательского интерфейса;
14. Тестирование бинарного клапана;
15. Тестирование обнуления датчиков давления;
16. Тестирование потока турбины;
17. Тестирование давления турбины;
18. Тестирование клапана выдоха;
19. Тестирование клапана вдоха;
20. Тестирование подключения кислорода;
21. Тестирование клапана небулайзера;
22. Тестирование предохранительного клапана;
23. Тестирование внутреннего технического контура датчика потока;
24. Тестирование датчика давления HEPA фильтра;
25. Тестирование погрешностей датчиков давления;
26. Тестирование погрешностей потока;
27. Тестирование смесителя кислорода;
28. Тестирование герметичности;
29. Тестирование световой и звуковой индикации;
30. Тестирование батарейного переключателя;
31. Тестирование вентилятора охлаждения;

32. Тестирование аварийного динамика;
 33. Тестирование датчика CO2*
 34. Тестирование опции вызова медперсонала*
 35. Выполнение калибровки тацскрина;
 36. Выполнение калибровки клапана выдоха;
 37. Выполнение калибровки датчиков давления;
 38. Выполнение калибровки кислородной ячейки;
 39. Выполнение калибровки датчика потока;
 40. Выдача протокола контроля технического состояния аппарата.
- «*» - обозначены возможные опции

Перечень запчастей и расходных материалов для проведения комплексного ТО**	Кат. Номер
Набор пылевых фильтров для HEPA и вентилятора охлаждения для Hamilton C2	160215
Датчик кислорода C2/T1	396200
HEPA фильтры для Hamilton C2	160216
HPO фильтр	160497
Подсветка LCD	Кат. номер: 380044 / сер. номер: меньше 1676 кат. номер: 380030
Турбина в сборе	160250
Набор аккумулятора литий-ионного	369106

«**» - Перечень зависит от часов наработки и даты выпуска аппарата

Инженер-разработчик

ООО МТСК «Лаборатория»:



ООО МТСК «Лаборатория»

109202, г. Москва, ш.Фрезер,
д.5/1, помещение 1, оф. 47

Телефон: +7(495) 640-2583
Телефакс: +7(495) 640-2583