

ООО МТСК «Лаборатория»

Адрес: 109202, г. Москва, ш. Фрезер, д.5/1, помещение 1, оф. 47


Тел./факс: (495) 640-2583

ИНН/КПП: 7721792651 / 772101001

ОГРН: 1137746359519

Лицензия на осуществление деятельности

по техническому обслуживанию №ФС-99-04-001260 от 22.04.14 г.

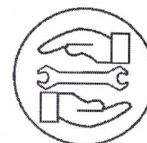

www.mtsklab.ru

Работы по техническому обслуживанию Hamilton-G5

1. Внешний осмотр блоков аппарата на наличие механических повреждений;
2. Проверка присутствия и читаемости всех наклеек на аппарате;
3. Проверка тормозных зажимов стойки аппарата;
4. Проверка соединительных кабелей, проверка разъемов и фиксаторов, трубок на наличие видимых физических повреждений;
5. Прочистка печатных плат от загрязнений с частичной разборкой;
6. Проверка или обновление программного обеспечения в соответствии с рекомендациями завода производителям;
7. Демонтаж компонентов с закончившимся сроком эксплуатации;
8. Установка компонентов взамен демонтированных;
9. Проверка памяти ошибок аппарата;
10. Тестирование VUP;
11. Тестирование звуковой и световой индикации;
12. Тестирование VRC-VUP коммуникаций;
13. Тестирование AC/DC конвертера;
14. Тестирование DC/AC конвертера;
15. Тестирование кислородной ячейки;
16. Тестирование смесителя;
17. Тестирование технического внутреннего контура датчика потока;
18. Тестирование предохранительного клапана;
19. Тестирование клапана безопасности;
20. Тестирование клапана вдоха;
21. Тестирование клапана выдоха;
22. Тестирование небулайзера;
23. Тестирование внутренней батареи;
24. Тестирование дополнительной батареи*;
25. Тестирование контроллера манжеты*;
26. Тестирование компрессора*;
27. Тестирование IPP;
28. Тестирование дисплея;
29. Тестирование пользовательского интерфейса и тона звука;
30. Тестирование аварийного динамика;
31. Тестирование датчика CO2*;
32. Тестирование увлажнителя H900*;

